



medi

medi Shoulder sling

Schulterimmobilisationsorthese ·
Shoulder joint support · Bandage
d'immobilisation · Vendaje para la
inmovilizacion del hombro

Gebrauchsanweisung. Instructions for use.

Mode d'emploi. Instrucciones de uso.

Instruções para aplicação. Istruzioni per l'uso.

Gebruiksaanwijzing. Návod k použití.

Uputa za uporabu. Инструкція по використанню.

Instrukcja zakładania. Οδηγία εφαρμογής. Használati


útmutató. Uputstvo za upotrebu. Інструкція з

використання. 使用说明.

medi. I feel better.



1

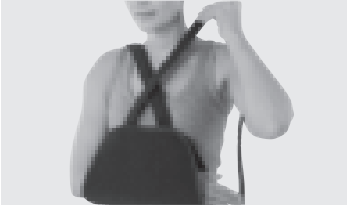

2



3



4



5

medi Shoulder sling

Назначение

Отводящая шина medi Shoulder sling может быть использован только в случае отсутствия заболеваний и повреждений кожи непосредственно в области применения шины в качестве раневого покрытия.

Показания

Послеоперационное лечение и иммобилизация плечевого сустава

Противопоказания

До настоящего времени не выявлены.

Инструкция по пользованию

- Инструкция по пользованию
 - Откройте все застежки-липучки.
 - Вложите руку травмированного плеча в повязку (рис. 1).
 - Обмотайте оба плечевых ремня крест-накрест вокруг верхней части тела и положите их концы на плечо (рис. 2).
 - Возьмите конец одного ремня и прикрепите его к повязке (рис. 3).
 - Прикрепите к повязке конец второго ремня.
 - При необходимости для улучшения фиксации (особенно в ночное время) можно дополнительно наложить широкий ремень. Прикрепите его сзади (на локте) к повязке и наложите его на живот, а затем на спину. При этом рука должна двигаться свободно (рис. 5).
-

Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните застежки-липучки. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием мощного средства medi clean или в щадящем режиме стирки при температуре 30 °C с мягким моющим средством без использования ополаскивателя.
- Не отбеливать.

- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



Указания по хранению

Пожалуйста, храните бандаж в сухом месте, предотвращая попадание прямых солнечных лучей.

Материалы

полиамид.

Ответственность

При использовании изделия не по назначению производитель не несет никакой ответственности. Также соблюдайте указания по безопасности и предписания, приведенные в этой инструкции.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!